

## Corega Komfort krem 40 g

Cena: 18,69 pln



### Opis słownikowy

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Dawka             | -                        |
| Opakowanie        | 40 g                     |
| Pojemność         | 40 g                     |
| Postać            | krem                     |
| Producent         | HALEON POLAND SP. Z O.O. |
| Rejestracja       | Wyrób medyczny inny      |
| Substancja czynna | -                        |

### Opis produktu

#### Opis:

Jeżeli szukasz extra komfortu dla swoich dziąseł, bez nacisku, tarcia i podrażnień, które mogą być spowodowane noszeniem protezy, wypróbuj krem do protez Corega Komfort. Dzięki technologii ADAPTAGRIP Corega Komfort to więcej niż krem mocujący. Tworzy on aktywowany za pomocą wody żel, który zawiera karbomer i karboksymetylocelulozę. Dzięki temu zaczyna natychmiast działać, zapewniając Twoim dziąsłom ochronną warstwę amortyzującą oraz wygodne mocowanie protezy przez cały dzień.

#### Zalety Corega Komfort:

- Krem mocujący do protez dbający o komfort dziąseł
- Zapewnia ekstrakomfort dziąsłom
- Pomaga chronić dziąsła przed naciskiem, tarciami i podrażnieniami
- Dzięki technologii ADAPTAGRIP tworzy ochronną warstwę amortyzującą
- Ma żelową konsystencję
- Precyzyjna końcówka ułatwia dozowanie kremu
- Wygodnie mocuje protezę na cały dzień
- Podnosi komfort codziennego noszenia protez

#### Dawkowanie:

##### KROK 1

Proteza górna: nanieś produkt w postaci jednego długiego paska, następnie uzupełnij go dwoma krótszymi paskami na środku protezy.  
Proteza dolna: nanieś produkt w postaci jednego długiego paska.  
Proteza częściowa: nałóż dwa krótkie paski produktu.

##### KROK 2

Wyplukać usta przed założeniem protezy.

**KROK 3**

Dociśnij protezę do docelowego miejsca z nałożonym kremem mocującym, przytrzymaj mocno i zagryź protezę na kilka sekund.

**JAK WYJĄĆ PROTEZĘ?**

1. Wypłucz jamę ustną wodą.
2. Powoli, delikatnie kołyszając protezę na boki, wyjmij ją z jamy ustnej.
3. Usuń resztki kremu z dziąseł i protezy za pomocą miękkiej, szczoteczki.
4. Aby jeszcze dokładniej oczyścić protezę, użyj Corega Podwójna Siła.

**Przechowywanie:**

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Skład:**

Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Carbomer, Silica, Cera Alba, Aroma, Limonene.

**Podmiot odpowiedzialny:**

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.