

# Corega Max Mocowanie + Świeżość krem 40g

Cena: 22,92 pln



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Pojemność	40 g
Postać	krem
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Opis:

Krem mocujący Corega o smaku miętowym jest aromatyzowany olejkami mięty pieprzowej, mięty zielonej i naturalnym olejkiem bazyliowym, który nadaje odświeżający smak. Ciesz się odczuciem świeżości – możesz zachować spokój i mieć pewność, że możesz być blisko przyjaciół i rodziny.

Zapewnia mocowanie protezy do 12 godzin, a precyzyjna końcówka aplikatora pomaga nałożyć dokładnie odpowiednią ilość kremu. Ciesz się wolnością wyboru każdego rodzaju jedzenia i przekąsek, takich jak orzechy, nasiona lub popcorn, bez obaw o przedostawanie się drobinek jedzenia pod protezę i delektuj się każdym kęsem. Kremy do protez mogą również poprawić komfort noszenia protezy. Ponadto Corega Max Mocowanie + Świeżość nie zawiera cynku.

### Dawkowanie:

#### KROK 1

Proteza górna: nanieś produkt w postaci jednego długiego paska, następnie uzupełnij go dwoma krótszymi paskami na środku protezy.  
Proteza dolna: nanieś produkt w postaci jednego długiego paska.  
Proteza częściowa: nałóż dwa krótkie paski produktu.

#### KROK 2

Wypłukać usta przed założeniem protezy.

#### KROK 3

Dociśnij protezę do docelowego miejsca z nałożonym kremem mocującym, przytrzymaj mocno i zagryź protezę na kilka sekund.

### JAK WYJĄĆ PROTEZĘ?

1. Wypłucz jamę ustną wodą.
2. Powoli, delikatnie kołyszając protezę na boki, wyjmij ją z jamy ustnej.

3. Usuń resztki kremu z dziąseł i protezy za pomocą miękkiej, szczoteczki.
4. Aby jeszcze dokładniej oczyścić protezę, użyj Corega Podwójna Siła.

**Przechowywanie:**

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Skład:**

Kopolimer wapniowo-sodowy PVM / MA, wazelina, guma celulozowa, parafina płynna, aromat, alkohol benzylowy.

**Podmiot odpowiedzialny:**

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.