

Demoxoft Kompres termiczny na oczy 1 szt



Cena: 26,43 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis:

Demoxoft Kompres Termiczny to wyrób medyczny wielokrotnego użytku, który wykorzystuje terapię ciepłem do łagodzenia objawów takich jak dyskomfort, suchość, pieczenie, nadmierne łzawienie i zmęczenie oczu. Jest szczególnie polecany osobom z zespołem suchego oka, zapaleniem brzegów powiek, dysfunkcją gruczołów Meiboma, jęczmieniem oraz gradówką.

Dzięki ergonomicznemu kształtowi, kompres idealnie dopasowuje się do okolic oczu, zapewniając komfortowe i skuteczne działanie. Jego równomierne rozprowadzanie ciepła pomaga odblokować kanaliki gruczołów Meiboma, co wspiera naturalne nawilżenie oczu i przyspiesza proces gojenia.

Jak stosować?

1. Podgrzej kompres w gorącej wodzie przez około 5 minut, zachowując ostrożność, aby uniknąć poparzenia.
2. Połóż na czystą chusteczkę higieniczną, a następnie delikatnie przyłóż do zamkniętej powieki na 5-10 minut.
3. Po zakończeniu terapii wykonaj delikatny masaż powiek, aby ułatwić wydostanie się wydzieliny z kanałków gruczołów Meiboma. Produkt jest bezpieczny dla dorosłych oraz dzieci powyżej 3. roku życia, jednak jego stosowanie u dzieci powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.

Podmiot odpowiedzialny:

Verco S.A.
Skwer Kard S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U
01-015 Warszawa

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.