

# Heviran Comfort Plastry na opryszczkę 15 sztuk

Cena: 23,99 pln



## Opis słownikowy

Opakowanie	15 szt.
Postać	plast.
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Opis:

Heviran Comfort plastry na opryszczkę zmniejszają widoczność oraz łagodzą dolegliwości związane z opryszczką.

Wyrób medyczny jest w postaci miękkiego krążka poliuretanowego nasączonego hipoalergiczną substancją, w której rozpuszczono kwas hialuronowy (0,5%). Kwas hialuronowy, dzięki odpowiedniemu nawilżeniu skóry, łagodzi uczucie swędzenia i mrowienia oraz chroni przed powstawaniem blizn.

Heviran Comfort plastry na opryszczkę działają jak ochronna tarcza:

- wspomagają proces gojenia opryszczki dzięki utrzymaniu odpowiedniego mikrośrodowiska
- zmniejszają ryzyko infekcji tworząc barierę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi
- chronią przed przeniesieniem wirusa na inne miejsca na skórze lub zakażeniem innych osób dzięki higienicznemu sposobowi aplikacji

Heviran Comfort plastry na opryszczkę można stosować na każdym etapie rozwoju opryszczki, a najlepiej przy pierwszych objawach.

Plastry testowane dermatologicznie. Umożliwiają nałożenie makijażu.

### Dodatkowe informacje:

Plaster może powodować reakcję alergiczną skóry.

- Należy zachować kartonik lub saszetkę/opakowanie bezpośrednio plastra w celu ewentualnej konsultacji z lekarzem.
- Nie wyrzucać do środowiska naturalnego.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do Wytwórcy i do URPLW MiPB.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Plastry jednorazowego użytku

**Warunki przechowywania:**

Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią.  
Przechowywać z dala od promieni słonecznych, chronić przed światłem.

**Sposób użycia:**

Plaster zawiera wygodny aplikator (podłużny „ogonek”), który umożliwia higieniczne, bezdotykowe i sprawne nałożenie plastra na opryszczkę, co pozwala uniknąć zakażenia innych części ciała lub innych osób.

Otworzyć saszetkę i wyjąć plaster trzymając tylko za podłużny „ogonek”.  
Przykleić plaster na opryszczkę i delikatnie odkleić „ogonek”.  
Usunąć niebieską folię ochronną, dzięki temu na ustach pozostanie niewidoczny plaster.

**Skład:**

kwas hialuronowy (0,5%)

**Dystrybutor:**

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.  
83-200 Starogard Gdański  
ul. Pelplińska 19