

Katarek Complete Secure+ Zestaw Aspirator

Cena: 56,95 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 zest.
Postać	-
Producent	DUNA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis:

Katarek Complete Secure+ to zestaw na katar, który zawiera aspirator kataru podłączany do domowego odkurzacza, 20 ampułek soli fizjologicznej Katarek Secure+, oraz zestaw akcesoriów a wszystko to zamknięte w wygodnym plastikowym pudełku.

Uzupełnieniem zestawu jest sól fizjologiczna Katarek Secure+. Ampułka tej soli, dzięki innowacyjnej, kulistej budowie aplikatora jest bezpieczniejsza w użyciu i bardziej precyzyjna w aplikacji od standardowych ampułek. Jest to spowodowane tym, że po otwarciu nie powstają ostre krawędzie, które mogłyby zranić dziecko.

Aspirator kataru podłączany do odkurzacza pozwala na odciągnięcie z nosa dziecka kataru. Jest to bardzo ważne, gdyż małe dzieci nie umieją jeszcze samodzielnie wydmuchiwać nosa. Aspiratora można używać już od pierwszych dni życia dziecka.

Kompletny Zestaw:

Katarek Complete Secure+ to nie tylko aspirator kataru podłączany do odkurzacza ale, dzięki soli fizjologicznej Katarek Secure+, kompletny zestaw do prawidłowej aspiracji kataru u dzieci!

1. Użyj soli fizjologicznej aby rozcieńczyć katar w nosie dziecka
2. Użyj aspiratora aby odciągnąć wydzielinę
3. Nawilż śluzówkę nosa dziecka po aspiracji solą fizjologiczną

Wygodne przechowywanie:

Katarek Complete Secure+ zapakowany jest w poręczne i wytrzymałe opakowanie-pudełko w kształcie apteczki.

Opakowanie pozwala na wygodne przechowywanie nie tylko aspiratora ale także zestawu akcesoriów i soli fizjologicznej. Dzięki poręcznemu kształtowi i wytrzymałej konstrukcji możesz wygodnie przechowywać nieużywany zestaw w domu a także bezpiecznie zabrać go ze sobą w podróż albo na wakacje, nie martwiąc się, że uszkodzisz aspirator.

Zawartość zestawu:

- Aspirator kataru z rozkręcaną komorą.
- Dwie końcówki do aspiratora
- Szczoteczka
- Katarek Secure+ roztwór soli fizjologiczny (20 ampulek po 5 ml).

Mycie i dezynfekcja:

Części aspiratora myj bezpośrednio po użyciu ciepłą wodą o jakości wody pitnej oraz detergentem przyjaznym dla dzieci.

Chcąc zdezynfekować produkt przetrzyj go miękką ściereczką lub wacikiem nasączonym alkoholem etylowym klasy farmaceutycznej.

Przechowywanie:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zawartość pudełka:

- aspirator kataru z rozkręcaną komorą
- dwie końcówki
- szczoteczka
- Roztwór soli fizjologiczny Katarek Secure+ 20 amp.5 ml.

Podmiot odpowiedzialny:

DUNA SP. Z O.O.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.