

OST Tendon 40 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwań, 1 ampułkostrzykawką



Cena: 299,99 pln

Opis słownikowy

Dawka	40 mg/2ml
Opakowanie	1 amp.-strz.
Postać	roztw.do wstrz.
Producent	TRB CHEMEDICA POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis:

OST Tendon - 2 % hialuronian sodowy otrzymany metodą fermentacji, to wyrób medyczny stosowany w leczeniu bólu oraz ograniczonej ruchomości w chorobach ścięgien.

Działanie i zastosowanie:

Ścięgno jest mocną i odporną strukturą włóknistej tkanki łącznej, której zadaniem jest przekazywanie sił z mięśnia do kości i stawianie oporu podczas kontrakcji mięśnia. Ścięgna mogą być otoczone przez różne struktury: włókniste pasma, pochewki maziowe, pochewki wokół ścięgien, kaletki ścięgien. Przeciążenie lub nieodpowiednie napięcie może powodować zapalenie i/lub zmiany degeneracyjne ścięgna prowadzące do bólu oraz utraty funkcji. Nawilżanie ścięgna może zmniejszyć ból, poprawić funkcję ścięgna i zmniejszyć możliwość powstawania zrostów. Z powodu swoich nawilżających i wiskoelastycznych właściwości OST Tendon sprzyja ślizganiu się ścięgna oraz fizjologicznym procesom naprawczym. Dodatkowo, z powodu jego wielkocząsteczkowej sieci, OST Tendon hamuje swobodne przemieszczanie się komórek i cząsteczek zapalnych. OST Tendon jest przezroczystym roztworem naturalnego i wysoko oczyszczonego hialuronianu sodowego, otrzymanego w procesie fermentacji i wolnego od białek zwierzęcych. OST Tendon zawiera także mannitol, zmiatacz wolnych rodników, który wspomaga stabilizację łańcuchów hialuronianu sodowego. W badaniach biokompatybilności OST Tendon okazał się być szczególnie bezpieczny.

Skład:

1 ml izotonicznego roztworu zawiera 20,0 mg hialuronianu sodowego oraz chlorek sodu, wodorofosforan sodu, dwuwodorofosforan sodu, mannitol i wodę do iniekcji.

Dawkowanie:

Wstrzyknąć OST Tendon wokół chorego ścięgna lub do pochewki chorego ścięgna raz w tygodniu do całkowitej ilości 2 iniekcji. Możliwe jest jednoczesne leczenie kilku ścięgien. W razie potrzeby można powtarzać cykle leczenia. Zawartość i zewnętrzna powierzchnia

ampułkostrzykawki OST Tendon jest jałowa tak długo, dopóki sterylne opakowanie pozostaje nieuszkodzone. Wyjąć ampułkostrzykawkę z jałowego opakowania, odkręcić osłonkę z końcówki Luer-Lok™, zamocować odpowiednią igłę (np. 25 do 27G) i zabezpieczyć ją lekko obracając. Jeśli w strzykawce znajduje się pęcherzyk powietrza, należy go usunąć przed iniekcją. OST Tendon jest wyrobem medycznym. Wyłącznie do użytku lekarza.

Przechowywanie:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Działanie niepożądane:

Podczas leczenia przy pomocy OST Tendon mogą wystąpić miejscowe objawy uboczne, takie jak ból, uczucie ciepła, siniaki, zaczerwienienie oraz obrzęk.

Podmiot odpowiedzialny:

TRB CHEMEDICA POLAND SP. Z O.O.
ul. Ligocka 103/3d
40-568 Katowice, Polska

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.