

Plastry PASOCARE KIDS LINE NEONOWE 10 sztuk

Cena: 4,04 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 szt.
Postać	-
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis:

Oddychające i elastyczne plastry w atrakcyjnych, neonowych kolorach przeznaczone dla dzieci.

Zawiera plastry:

Oddychające – przyspieszają gojenie ran.
Elastyczne – dopasowują się do kształtu ciała
Delikatne – idealne dla wrażliwej skóry dziecka,
Hipoalergiczne - nie powodują uczuleń.

Sposób użycia:

Wymij plaster z opakowania bezpośredniego.
Zaaplikuj plaster na czystą i suchą skórę, kierując opatrunek bezpośrednio na ranę.
W celu usunięcia plastra, chwycić za jego krawędź i pociągnąć wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia.
Zmieniaj plaster codziennie.

Przechowywanie:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednie plastra jest uszkodzone.
Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem.
Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia.

Podmiot odpowiedzialny:
PASO-TRADING SP. Z O.O.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.