

# Softeye Blepha+, chusteczki okulistyczne, 14 sztuk + kompres

Cena: 30,11 pln



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 zest.
Postać	zest.
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Opis:

Wyrób medyczny.

Dla dzieci i dorosłych.

W zestawie z ogrzewalnym kompresem na oko.

Jednorazowe chusteczki okulistyczne wykonane z naturalnej bawełny, nasączone roztworem zawierającym Hy-Ter® (hialuronian sodu i naturalny ekstrakt z drzewa herbacianego) i aloes.

Przeznaczone do codziennej higieny powiek, szczególnie w przypadku stanu zapalnego, infekcji oraz przed i po zabiegach chirurgicznych.

Można stosować u osób noszących soczewki kontaktowe.

Bez konserwantów.

### Zawartość opakowania:

14 jednorazowych chusteczek + 1 ogrzewalny kompres.

### Działanie:

Produkt posiada działanie oczyszczające, zmiękczaające, kojące i udraźniająca. Przynosi szybką ulgę dzięki zawartości naturalnych składników odkażających i przeciwzapalnych.

W tylnym zapaleniu brzegów powiek dochodzi do zablokowania ujść gruczołów Meiboma. Zastosowanie ciepłego kompresu na oko w połączeniu z masażem powieki umożliwia odblokowanie i oczyszczenie ujść gruczołów. Dzięki temu, mogą one wznowić naturalną produkcję lipidów, niezbędnych do utrzymania w dobrym stanie filmu łzowego.

### Wskazania:

Wyrób medyczny Softeye Blepha stosowany jest pomocniczo:  
przy zapaleniu powiek i spojówek,  
przy leczeniu bakteryjnego i alergicznego zapalenia spojówek,  
przed i po zabiegach chirurgicznych, jako środek odkażający,  
do higieny powiek i rzęs.

#### **Sposób użycia wyrobu medycznego:**

Rozgrzej kompres do momentu zmiany barwy z pomarańczowej na żółtą.  
Kompres można rozgrzać trzymając go pod gorącą wodą z kranu lub zanurzyć go w gorącej wodzie, do momentu zmiany barwy.  
Przed wykonaniem masażu oka zawsze należy sprawdzić temperaturę kompresu, przykładając go do wewnętrznej strony nadgarstka.  
Jeśli jest zbyt gorący, należy odczekać kilka minut i sprawdzić ponownie.  
Jeśli barwa nie jest jednorodna, potrząśnij kompresem przed użyciem.  
Trzymając kompres za skrzydełko, masować powiekę z lekkim naciskiem przez 3-5 minut.  
Bezpośrednio po masażu otworzyć saszetkę i wyjąć chusteczkę.  
Rozłóż chusteczkę, zamknąć oczy i delikatnie oczyścić powieki i rzęsy, w kierunku od wewnętrznego kącika oka do zewnętrznego.  
Po użyciu umyć ręce.  
Należy używać jednej chusteczki na jedno oko.  
Nie przemywać oka po zastosowaniu produktu.  
Po użyciu opłukać kompres woda i umieścić z powrotem w opakowaniu.

#### **Przeciwwskazania i środki ostrożności:**

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.  
Tylko do użytku zewnętrznego, do stosowania w okolicach oczu, przy zamkniętych powiekach.  
Każda saszetka przeznaczona do jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie zużytej chusteczki.  
Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.  
Nie stosować po upływie terminu ważności.  
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.  
Przechowywać w temperaturze pokojowej i unikać kontaktu z wodą.  
Nie przebijać kompresu i nie połykać produktu.  
Po wykorzystaniu ostatniej chusteczki wyrzucić kompres.  
Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego  
Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych.

#### **Skład:**

Woda, PEG/PPG-20/15 dimetikon, wyciąg z aloesu zwyczajnego, Hy-Ter (hialuronian sodu, 4-terpineol), glicyryzynie amonu, glukozyd kaprylowo-kaprynowy, sól sodowa kokoiloaminokwasów pszenicy, etyloheksylogliceryna, alkohol fenyloetylowy, chlorek sodu, fosforan sodu, wodorofosforan sodu, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 uwodorniony olej rycynowy.

Nie zawiera konserwantów.

#### **Dystrybutor:**

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.  
83-200 Starogard Gdański  
ul. Pelplińska 19

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.