

# URGO Oparzenia i rany 5X5cm 6 sztuk SIATECZKA NA OPARZENIA I RANY POWIERZCHNIOWE



Cena: 10,14 pln

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	6 szt.
Pojemność	6 sztuk
Postać	opatr.
Producent	URGO SP.Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Opis:

URGO Siateczka na oparzenia i rany powierzchniowe to gotowa do użycia, sterylna siateczka z opatentowaną technologią lipidokoloidową (TLC). Skuteczność TLC została potwierdzona w badaniach klinicznych. Opatrunek składa się z cienkiej poliestrowej siateczki nasączonej cząstkami hydrokoloidu oraz wazeliny.

### Jak działa urgo siateczka na oparzenia i rany powierzchniowe?

Leczy oparzenia I i II stopnia oraz rany powierzchniowe.

Szybko uśmierza ból.

Przyspiesza gojenie – hydrokoloid w kontakcie z wysiękiem z rany tworzy lipidowo-koloidowy żel. Dzięki temu powstają odpowiednie warunki do gojenia rany w wilgotnym środowisku.

Umożliwia bezbolesne usunięcie opatrunku – cząsteczki wazeliny zapobiegają przywieraniu opatrunku do rany.

Dopasowana do wielkości rany - możliwość docięcia siateczki lub ułożenia siateczek jedna obok drugiej, aby pokryć rozległe rany o nieregularnym kształcie.

### Jak stosować urgo siateczkę na oparzenia i rany powierzchniowe?

W przypadku oparzenia powierzchniowego drugiego stopnia: Na początek schłodzić ranę zimną wodą przez 15 minut, aby zapobiec rozszerzeniu oparzenia. We wszystkich przypadkach: Oczyszczyć ranę roztworem antyseptycznym nie zawierającym alkoholu. Przemyc wodą lub solą fizjologiczną. W przypadku oparzenia nigdy nie stosować barwnych roztworów antyseptycznych takich jak eozyna. Starannie osuszyć przy użyciu sterylnego kompresu. W miarę możliwości zadbać o to, by powstały pęcherz nie pękł, ponieważ chroni on ranę przed zakażeniem. W przypadku pęknięcia pęcherza, zdezynfekować ranę. Nie należy usuwać warstwy martwego naskórka jeżeli nie zejdzie samoczynnie. Oderwać folię ochronną. Nałożyć na ranę. Opatrunek w postaci siateczki w razie potrzeby można przyciąć do odpowiedniego rozmiaru przy pomocy czystych, zdezynfekowanych nożyczek, a następnie przykryć drugim opatrunkiem takim jak

rozciągliwa opaska lub plaster. Stosowanie kremu przed nałożeniem opatrunku jest zbędne. Czas stosowania opatrunku to zazwyczaj od 5 do 6 dni, przy czym pierwszy opatrunek należy zmienić po 24 godzinach, a kolejne co 48 godzin.

**Przechowywanie:**

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Podmiot odpowiedzialny:**

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o .  
Aleje Jerozolimskie 142 B  
02-305 Warszawa

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.