

URGO Oparzenia i rany 10 x 7cm 4 sztuki OPARZENIA I RANY POWIERZCHNIOWE



Cena: 31,66 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	4 szt.
Postać	opatr.
Producent	URGO SP.Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis:

Leczenie oparzeń:
pierwszego stopnia,
powierzchniowe oparzenia drugiego stopnia,
powierzchniowe rany.

Jak działa urgo na oparzenia?

URGO opatrunek na oparzenia z technologią lipido-koloidalną o skuteczności potwierdzonej w badaniach.
Szybko uśmierza ból.
Ułatwiają gojenie.
Umożliwiają bezbolesne usuwanie.
Nie przyklejają się do rany.

Dlaczego warto wybrać urgo na oparzenia?

URGO opatrunek na oparzenia z unikalną technologią lipidokoloidalną – nie przywierają, przepuszczają powietrze. Dzięki warstwie ochronnej zbudowanej z poliestru i siateczce w technologii lipidokoloidalnej połączonych z elementami hydrokoloidowymi oraz wazeliną uśmierza ból i sprzyja gojeniu. Ponadto plaster nie przykleja się do rany i można go bezboleśnie zdjąć.

Jak stosować urgo na oparzenia?

W przypadku wszystkich oparzeń: Oczyszczyć ranę środkiem antyseptycznym bez alkoholu.
Opłucz wodą lub roztworem soli fizjologicznej URGO.

Ostrożnie osusz ranę sterylnym gazikiem. W przypadku oparzenia nigdy nie stosuj środków antyseptycznych zawierających eozynę.

Zdjąć warstwę ochronną z opatrunku. Nałożyć na obszar przeznaczony do leczenia - o ile to możliwe, nie ruszać pęcherza, ponieważ chroni przed zakażeniem. Jeżeli pęcherz jest pęknięty, odkaż obszar.

Nie usuwaj martwej skóry, jeżeli sama nie odpada.

Stosuj od 5 do 6 dni, przy czym opatrunek należy zmienić po raz pierwszy po ich 24 godzinach, a następnie zmieniaj co 48 godzin.

Przechowywanie:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o .

Aleje Jerozolimskie 142 B

02-305 Warszawa

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.