

# ZUMA Ulga dla oczu Krople z hialuronianem 0,4% 10 ml

Cena: 14,74 pln



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 ml
Pojemność	10 ml
Postać	-
Producent	S-LAB SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Opis:

Krople ZUMA NOKA 0,4 Ulga dla oczu są stosowane w przypadku suchości, podrażnień i zmęczenia oczu oraz noszenia soczewek kontaktowych. Przynoszą ulgę i nawilżają oczy.

### Działanie:

ZUMA ulga dla oczu 0,4 to nawilżające krople do oczu zawierające 0,4% roztwór hialuronianu sodu, otrzymywany na drodze syntezy biotechnologicznej. Hialuronian sodu ze względu na swoje szczególne właściwości fizykalne, lepkościowe i zdolność przylegania do rogówki, poprawia stabilność filmu łzowego i komfort widzenia.

### Składniki zawarte w kroplach:

- łagodzą objawy związane z zespołem suchego oka,
- przynoszą ulgę w przypadku podrażnień, zaczerwienienia i zmęczenia oczu spowodowanych zbyt długą pracą przy komputerze,
- przeciwdziałają podrażnieniu spojówek podczas noszenia soczewek kontaktowych,
- nawilżają oczy,
- przynoszą ulgę w przypadku podrażnień spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, takich jak: wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, kurz, klimatyzacja, ogrzewanie.

### Sposób użycia:

1. Krople do oczu ZUMA NOKA ulga dla oczu 0,4 należy stosować tylko zewnętrznie, miejscowo do worka spojówkowego.
2. Przed zakropleniem preparatu należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć nakrętkę i zakropić preparat do oka. Jeżeli kropla nie trafiła do oka, należy wkropić następną. Delikatnie zamrugać okiem. Zamknąć butelkę.

3. Po zakropleniu kropli, nie zakraplać/ płukać powierzchni oka wodą ani żadnym innym płynem.

4. Zakraplać 1 krople do worka spojówkowego oka 2-3 razy dziennie.

5. Jeżeli pacjent nie zdejmuje soczewek kontaktowych na noc, należy stosować krople ZUMA NOKA ulga dla oczu 0,4 przed snem i po przebudzeniu. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu, który ma kontakt z soczewkami kontaktowymi, należy zasięgnąć porady lekarza okulisty.

**Składniki:**

hialuronian sodu 0,4%, gliceryna, fosforan dwusodu, chlorek sodu, cetrymid, dwuwodorofosforan sodu, wersenian czterosodu, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.

**Przechowywanie:**

Preparat zachowuje trwałość przez 30 dni od pierwszego otwarcia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Preparat przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

**Podmiot odpowiedzialny:**

S-LAB Sp. z.o.o.  
ul. Kiełczowska 2  
55-095 Mirków  
Polska

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.